

HYBRIX-U

HYBRIX-U

Technology Innovation

- ・適応症例：尺骨遠位端骨折
- ・適応除外：尺骨骨幹部骨折
変形矯正骨切術



Compatibility

日本人の骨CTから得られた解析結果を基に日本人に適したアナトミカルデザインを採用




Standard

Long

Strong Subchondral Support

PolyaxialScrewの3つのロッキング機構から得られる強固な軟骨下骨支持

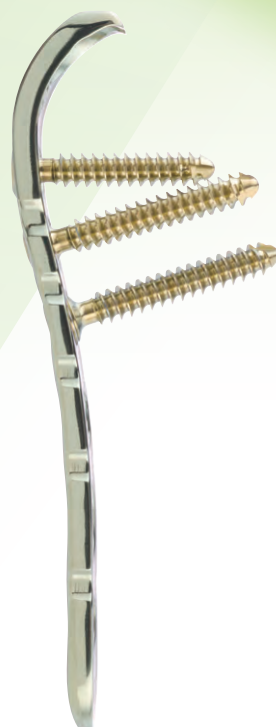

Hook Screw and Pin

茎状突起骨片を固定する専用のスクリューとピン



Hook Screw




Hook Pin



User-friendly instrument

術者の操作性を考慮した手術器具

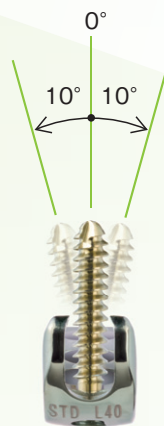

Angle of the Polyaxial Screw


PolyaxialScrewは、0°のニュートラルモードと左右10°までのフリーモードが選択可能



Implant


Long

Standard

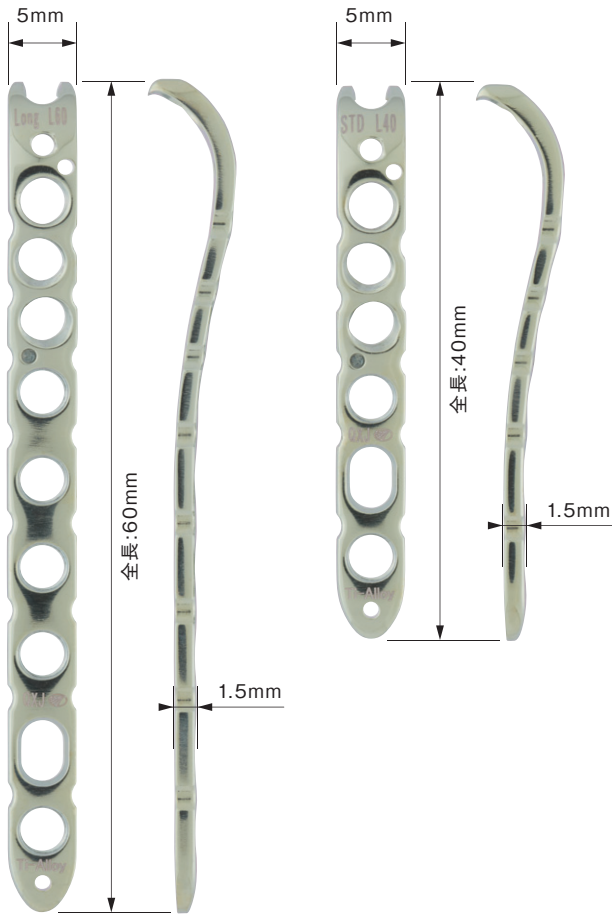

フックピン


フックスクリュー

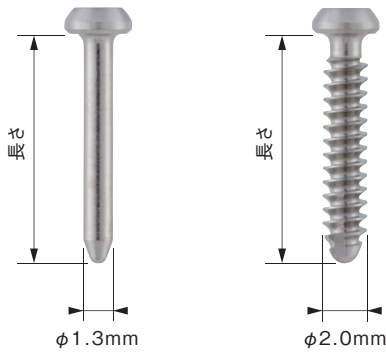

ポリアクシャル

モノアクシャル

コーティカル

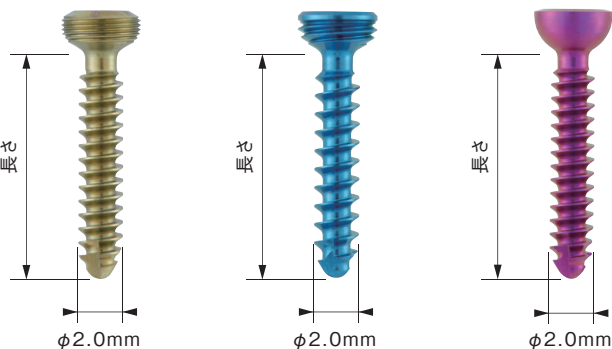

HYBRIX尺骨プレート

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品コード	JANコード	商品名	全長(mm)	クラス分類
11-982-01	4946329326734	HYBRIX尺骨プレート スタンダード40mm	40	Ⅲ
11-982-02	4946329326741	HYBRIX尺骨プレート ロング60mm	60	

HYBRIX尺骨フックピン

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品コード	JANコード	商品名 (直径×長さ)	クラス分類
11-983-08	4946329326772	HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×8mm	Ⅲ
11-983-09	4946329326789	HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×9mm	
11-983-10	4946329326796	HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×10mm	
11-983-11	4946329326802	HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×11mm	
11-983-12	4946329326819	HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×12mm	
11-983-13	4946329326826	HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×13mm	
11-983-14	4946329326833	HYBRIX尺骨フックピン φ1.3×14mm	

HYBRIX尺骨フックスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品コード	JANコード	商品名 (直径×長さ)	クラス分類
11-984-08	4946329326901	HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×8mm	Ⅲ
11-984-09	4946329326918	HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×9mm	
11-984-10	4946329326925	HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×10mm	
11-984-11	4946329326932	HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×11mm	
11-984-12	4946329326949	HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×12mm	
11-984-13	4946329326956	HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×13mm	
11-984-14	4946329326963	HYBRIX尺骨フックスクリュー φ2.0×14mm	

HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品コード	JANコード	商品名 (直径×長さ)	クラス分類
11-985-10	4946329327076	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×10mm	Ⅲ
11-985-11	4946329327083	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×11mm	
11-985-12	4946329327090	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×12mm	
11-985-13	4946329327106	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×13mm	
11-985-14	4946329327113	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×14mm	
11-985-15	4946329327120	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×15mm	
11-985-16	4946329327137	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×16mm	
11-985-17	4946329327144	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×17mm	
11-985-18	4946329327151	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×18mm	
11-985-19	4946329327168	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×19mm	
11-985-20	4946329327175	HYBRIX尺骨ポリアクシャルスクリュー φ2.0×20mm	

HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品コード	JANコード	商品名 (直径×長さ)	クラス分類
11-986-07	4946329327199	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×7mm	Ⅲ
11-986-08	4946329327205	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×8mm	
11-986-09	4946329327212	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×9mm	
11-986-10	4946329327229	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×10mm	
11-986-11	4946329327236	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×11mm	
11-986-12	4946329327243	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×12mm	
11-986-13	4946329327250	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×13mm	
11-986-14	4946329327267	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×14mm	
11-986-15	4946329327274	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×15mm	
11-986-16	4946329327281	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×16mm	
11-986-17	4946329327298	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×17mm	
11-986-18	4946329327304	HYBRIX尺骨モノアクシャルスクリュー φ2.0×18mm	

HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー

承認番号：23000BZX00095000

チタン合金

商品コード	JANコード	商品名 (直径×長さ)	クラス分類
11-987-07	4946329327342	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×7mm	Ⅲ
11-987-08	4946329327359	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×8mm	
11-987-09	4946329327366	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×9mm	
11-987-10	4946329327373	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×10mm	
11-987-11	4946329327380	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×11mm	
11-987-12	4946329327397	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×12mm	
11-987-13	4946329327403	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×13mm	
11-987-14	4946329327410	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×14mm	
11-987-15	4946329327427	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×15mm	
11-987-16	4946329327434	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×16mm	
11-987-17	4946329327441	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×17mm	
11-987-18	4946329327458	HYBRIX尺骨コーティカルスクリュー φ2.0×18mm	

※インプラントはすべて滅菌包装です。


※各インプラントをご使用の際は、必ず添付文書をお読みください。



※写真はインストゥルメントケースを使用した場合の収納例です。


HYBRIX尺骨インストゥルメント

商品コード	JANコード	商品名	セット 個数	クラス 分類	製造販売届出番号
①	21-982-01	4946329350418	1	I	13B1X00306G11046
②	21-982-02	4946329350425	1		13B1X00306G11046
③	21-982-03	4946329350432	2		13B1X00306G11047
④	21-982-04	4946329350449	1		13B1X00306G11048
⑤	21-982-05	4946329350456	1		13B1X00306G11049
⑥	21-982-06	4946329350463	1		13B1X00306G11050
⑦	21-982-07	4946329350470	1		13B1X00306G11050
⑧	21-982-08	4946329350487	1		13B1X00306G11051
⑨	21-982-09	4946329350494	1		13B1X00306G11052
⑩	21-982-10	4946329350500	1		13B1X00306G11053
⑪	21-982-11	4946329350517	2		13B1X00306G11054
⑫	21-982-12	4946329350524	1		13B1X00306G11054
⑬	21-982-13	4946329350531	1		13B1X00306G11055
⑭	21-982-14	4946329350548	2		13B1X00306G11056
⑮	21-982-15	4946329350555	1		13B1X00306G11057
⑯	21-982-16	4946329350562	1		13B1X00306G11057
⑰	21-982-17	4946329350579	2		13B1X00306G11058
⑱	21-982-18	4946329350586	1		13B1X00306G11058
⑲	21-982-19	4946329350593	1		13B1X00306G10891
⑳	01-930-90	4946329191141	1		13B1X00306G10390
㉑	21-982-20	4946329350609	1		-
㉒	21-982-99	4946329350616	1		-

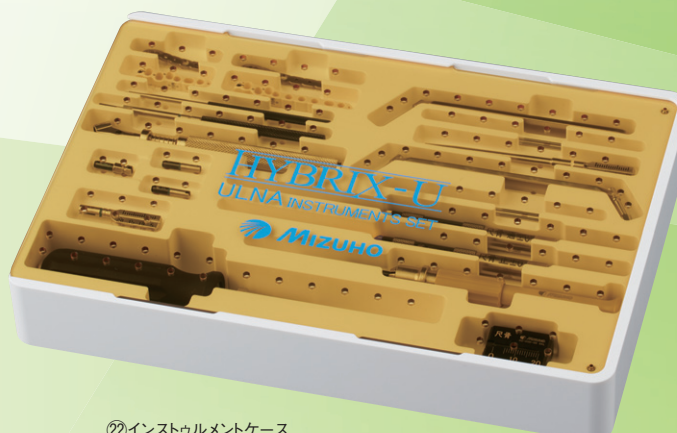


㉒インストゥルメントケース

Simple instruction manual

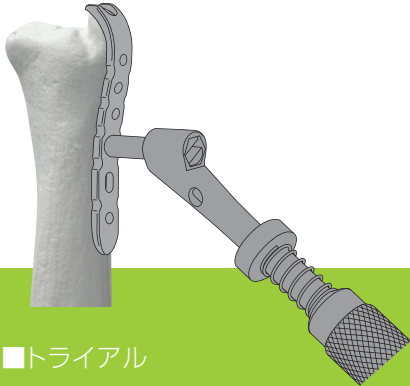


■トライアル

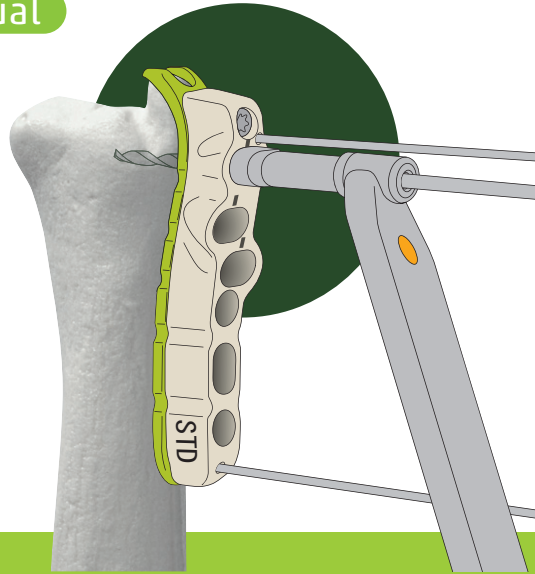

■プレート遠位部のドリリング

遠位1~3穴はポリアクシャルホールを採用。ポリモード、ニュートラルモードが選択できます。

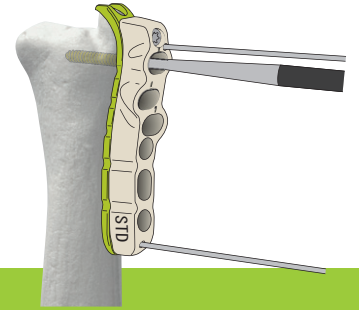


■ポリアクシャルスクリューの挿入・固定

(イ)


(ア)

【ニュートラルモード】
マルチドリルガイドのポリ・ニュートラル用(ア)を使用する場合

【ポリモード】
マルチドリルガイドのポリ・フリー用(イ)を使用する場合

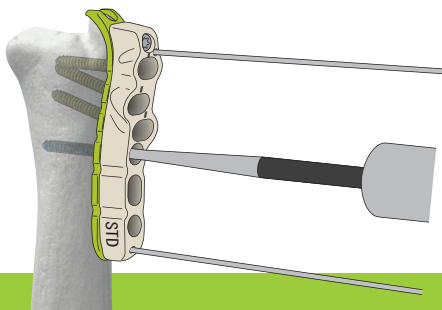


■モノアクシャルスクリュー挿入・固定

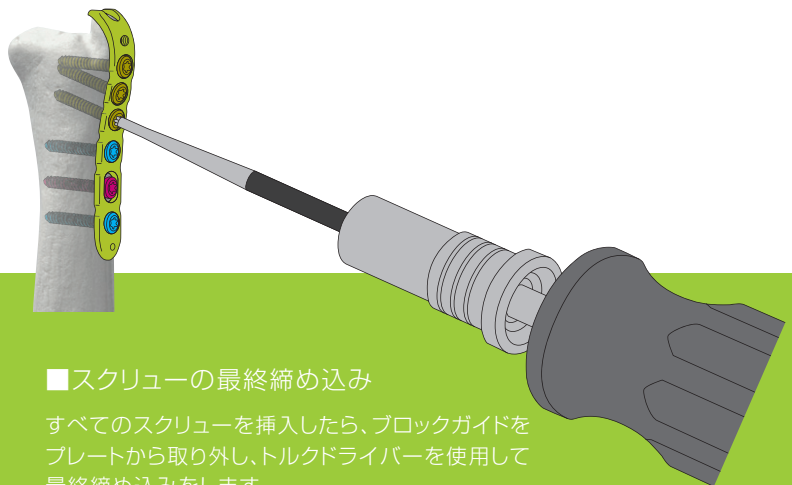

■スクリューの最終締め込み

すべてのスクリューを挿入したら、ブロックガイドをプレートから取り外し、トルクドライバーを使用して最終締め込みをします。

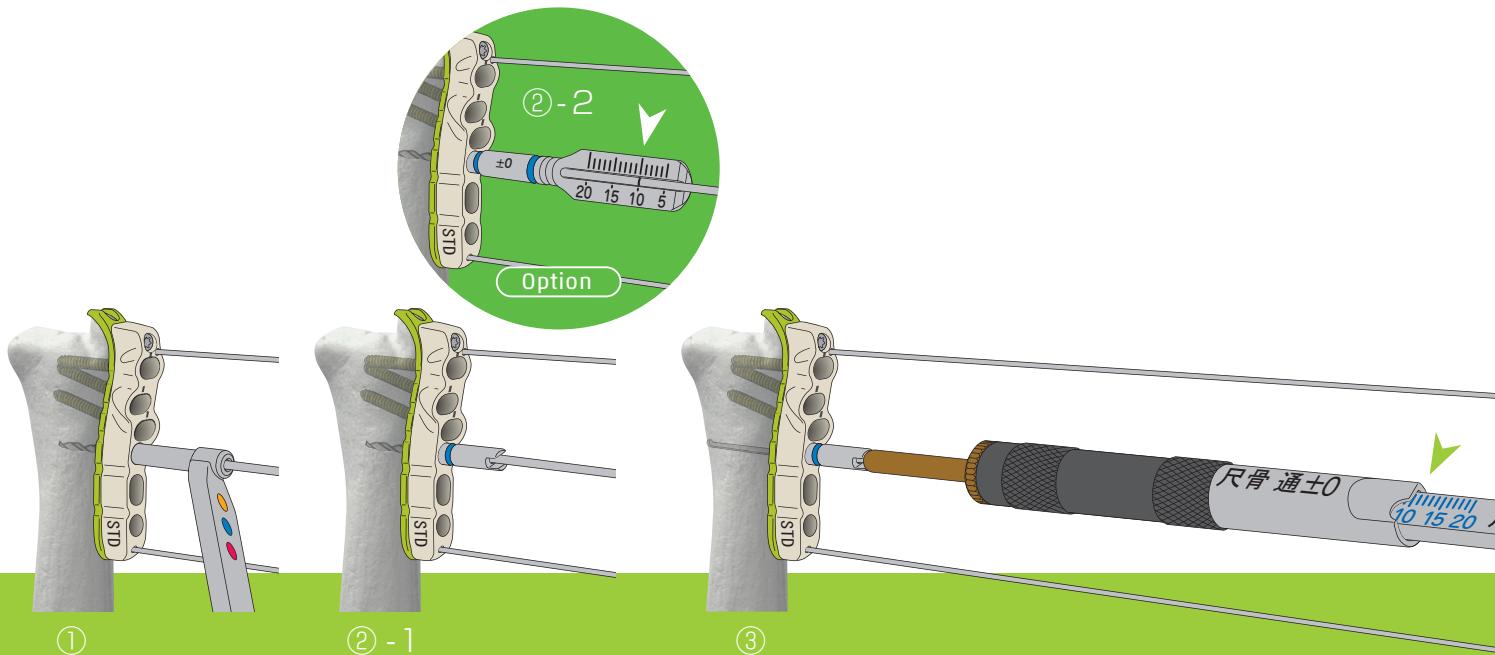

①

② - 1

③

■プレート骨幹部(近位)のドリリング

コーティカルスクリューを固定する場合

①マルチドリルガイドのポリ・フリー用を使用しドリリングを行います。

モノアクシャルスクリューを固定する場合

②-1 モノアクシャルワンホールガイドを装着しドリリングを行います。

②-2 ワンホールガイド用ゲージ付ドリルガイドを用いることで簡易計測が可能です。 **Option**

■スクリューサイズの計測

③デプスゲージ通し穴用を用いて計測します。

Option



■フックピン(フックスクリュー)の挿入・固定

茎状突起粉碎時に使用します。

計測方法は3通りから選択できます。

①フック用仮固定ピンの目盛りから計測します。

②デプスゲージ止め穴用を用いて計測します。

③フックピンゲージにて計測します。

HYBRIX-U



高度管理医療機器	類 別：医04 整形用品 一般的名称：体内固定用プレート 販 売 名：HYBRIX尺骨遠位端ハイブリッドロックングプレート JMDNコード：35241003	製造販売承認番号:23000BZX00095000
高度管理医療機器	類 別：医04 整形用品 一般的名称：体内固定用ネジ 販 売 名：HYBRIX尺骨遠位端ハイブリッドロックングプレート JMDNコード：16101003	製造販売承認番号:23000BZX00095000
高度管理医療機器	類 別：医04 整形用品 一般的名称：体内固定用ピン 販 売 名：HYBRIX尺骨遠位端ハイブリッドロックングプレート JMDNコード：32854003	製造販売承認番号:23000BZX00095000

ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



2501-PDF-BR-003-2501