



Operating Table
MOS-1302B

販売名：牽引手術台 MOS-1302B
下肢牽引装置

X線視野が広く、操作性を重視した 下肢牽引手術台



Function

1

軽量操作ボックス

操作ボックスは防滴加工が施されたシートスイッチ式を採用し、術後の清掃も簡単です。誤操作を防ぐため、Eボタン＋動作ボタンのW操作構造を採用しています。



2

本体予備スイッチの設置

万が一の操作ボックスの故障に備え、本体に予備スイッチを標準装備しました。



3

バッテリーを標準装備

バッテリーを標準装備し、コードレスでの使用を可能にすることで、手術室内のコード類による煩雑さを軽減します。また、コラムにはバッテリーの残量が一目でわかるバッテリーインジケータを配置しています。



4

電動油圧ブレーキ

4軸固定のため、術中のコラムベースの安定性があります。

5

4輪自由車

4輪自由車の採用により、前後左右の移動が容易に行えます。

6

ブレーキ解除ハンドル

緊急時のブレーキ解除や万が一の故障に備え、手動のブレーキ解除ハンドルを設置しました。



7

緊急停止スイッチの設置


安全面を考慮して、誤作動や緊急での動作停止を目的とした「緊急停止スイッチ」を標準装備しました。



8

体圧分散性を考慮した減圧マットレス

体圧分散性に優れたミスホオリジナルマットレスを標準装備。長時間の手術における褥瘡予防に配慮しました。

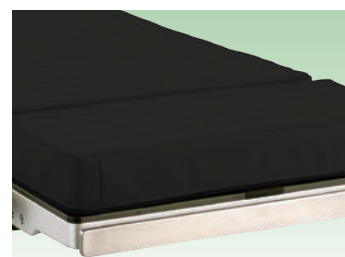

下肢牽引装置の特徴



※下肢牽引装置は別売です。

下肢牽引手術にスムーズに移行

MOS-1302Bの下肢牽引装置は、本体の脚板を取付けた状態で牽引装置を取付けることができるため、麻酔導入後に下肢牽引手術へスムーズに移行できます。

巾広ベッケンの採用



巾広ベッケンを採用し、体の小さな患者さんにも安定した牽引を行うことが可能です。

腰板の着脱が可能



腰板は分割式のためCアームの挿入が容易になりました。

広い透視空間

斜め上方に伸びた牽引装置アームによりCアームを挿入する空間を広くとることができ、分割式腰板との組合せでスムーズな手術をサポートします。

高い安定性

太い牽引装置アームとサポートロッドの取付けが可能な展開アームは、高い安定感があります。また、牽引装置の着脱には下肢牽引カートを使用することで、着脱を容易に行うことができます。




下肢牽引装置の装着

Operation


牽引手術以外の整形外科手術にも対応

牽引手術のみだけでなく、背上げ機能により肩などの手術にも使用できます。また、腰板が水平位より上に上がるため、腰椎手術時のサドルブロックにも有効です。また、ジャックナイフ位や砕石位などにも対応しており、一般外科手術にも幅広く使用できます。


さまざまな術式に対応できる幅広い可動域

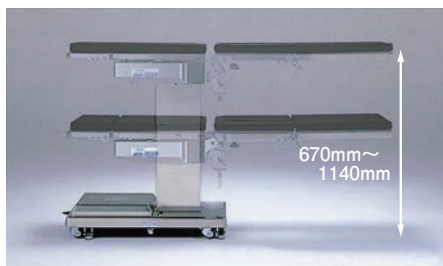

昇降範囲 670mm～1140mm

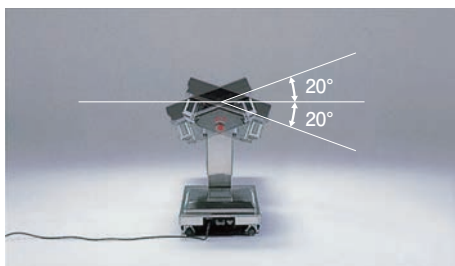

横転角度 左下がり/右下がり 各20°

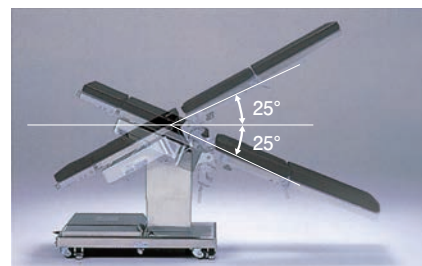


縦転角度 頭上がり/頭下がり 各25°

MOS-1302B

Positioning



大腿骨頸部骨折手術位

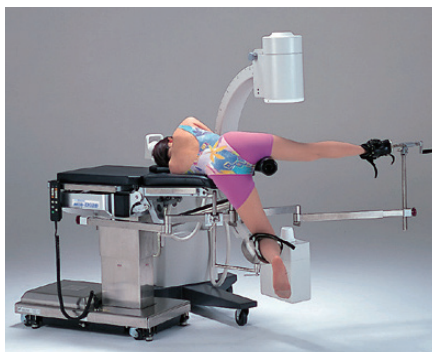


大腿骨骨幹部骨折手術位



下腿骨骨折手術位



後方手術位

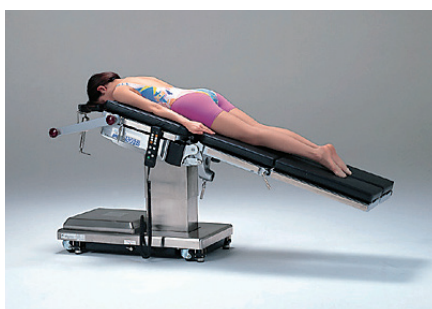


頸椎手術位



半坐位手術位




縫合手術位

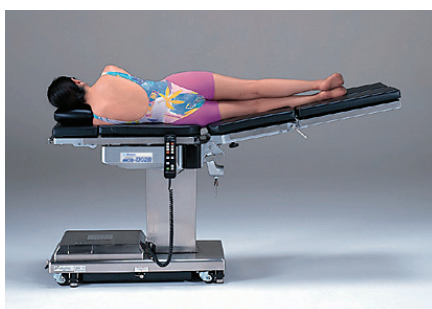

サドルブロック



肩手術位

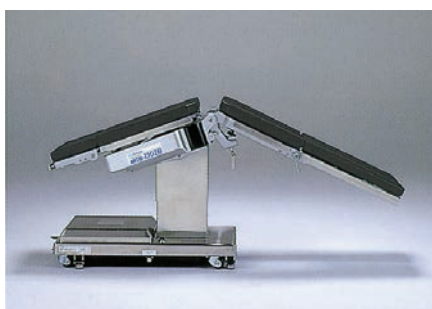

腎臓等手術位

Accessories

下肢牽引装置



牽引装置アーム

商品コード	08-115-01
JANコード	4946329068603

牽引器(2本組)

商品コード	08-115-04
JANコード	4946329068627

股間支柱(マット付)

商品コード	08-115-07
JANコード	4946329068658

展開アーム(2本組)

商品コード	08-115-02
JANコード	4946329068610

靴型(2個組)

商品コード	08-115-05
JANコード	4946329068634

幅広ベッケン(マット付)II

商品コード	08-115-76
JANコード	4946329384116



小児用骨盤台(H)

商品コード	08-115-08
JANコード	4946329068665



L型膝関節屈曲用ボール

商品コード	08-115-09
JANコード	4946329068672



下肢受 下肢受け用固定金具付

商品コード	08-115-10
JANコード	4946329068689




側臥位牽引用股間支柱 (カラー付)

商品コード	08-115-11
JANコード	4946329068696




側臥位牽引用下腿受

商品コード	08-115-12
JANコード	4946329068702

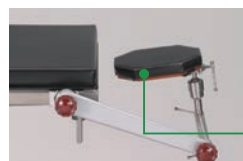

頭部台(M)

商品コード	08-115-13
JANコード	4946329068719

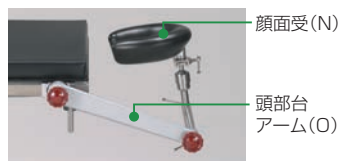

顔面受(N)

商品コード	08-115-14
JANコード	4946329068726

頭部台アーム(O)

商品コード	08-115-15
JANコード	4946329068733



牽引滑車

商品コード	08-115-17
JANコード	4946329068757



直達牽引器

商品コード	08-115-18
JANコード	4946329068764

※マット付

MOS-1302B



簡易直達牽引鉤
アタッチメント

商品コード	08-115-19
JANコード	4946329068771



MOS-1300用
移動式骨盤台

商品コード	08-115-20
JANコード	4946329068788

※マット付



骨盤補助ボード

MOT-5601,5801S等の手術台での側臥位ポジションの際に使用します。
MOT-5601/MOT-5801S 対応

商品コード	08-115-26
JANコード	4946329124057



サポートロッド(2本組)
Φ25×1000mm

商品コード	08-115-27
JANコード	4946329124064




カーボン製L型膝関節
屈曲用ポール

商品コード	08-115-43
JANコード	4946329150285



ボルシャルト用
直達牽引器

商品コード	08-115-45
JANコード	4946329167986

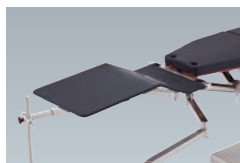

布製補助ボードⅡ
(ベッケンピン固定)

商品コード	08-115-77
JANコード	4946329384123

一般医療機器

類 別：機械器具(01)手術台及び治療台
一般的名称：手術台アクセサリ
販 売 名：下肢牽引装置
JMDNコード：70469000

製造販売届出番号：13B1X00306N10032

カート各種



付属品移動車 1300用

商品コード	08-081-07
JANコード	4946329067873



MOS-1300用下肢牽引カート
コンパクトタイプ

商品コード	08-081-10
JANコード	4946329217711



下肢牽引カート

商品コード	08-115-21
JANコード	4946329068795

その他の アクセサリ

手術台周辺機器 カタログ



各科の要望に幅広くお応えできる、ミズホ製オリジナルの手術台周辺機器を豊富に掲載したカタログです。詳しくは各営業所および購入店までお問い合わせください。


Specification

商品名	MOS-1302B 下肢牽引除き
商品コード	18-470-11
JANコード	4946329307566
販売名	牽引手術台 MOS-1302B
製造販売届出番号	13B1X00306N10280
類別	機械器具(01)手術台及び治療台
一般的名称	汎用電動式手術台
JMDNコード	36867020
クラス分類	I 特定保守管理医療機器
テーブルトップ寸法	2055mm(長)×500mm(幅)
ベース寸法	973mm(長)×483mm(幅)
質量	330kg
定格電源電圧	AC100-240V
定格電源周波数	50-60Hz
電源入力	400VA
バッテリー電源電圧	DC24V

昇降範囲(電動)	最高位1140mm	最低位670mm
縦転角度(電動)	頭下がり25°	頭上がり25°
横転角度(電動)	右下がり20°	左下がり20°
背板屈折角度(電動)	上がり60°	
腰板屈折角度(電動)	上がり30°	下がり90°
ブレーキ(電動)	固定/解除	
自動水平復帰(電動)	縦転/横転/腰板屈折:上がり→水平位置	
操作機器	操作ボックス/予備スイッチ/緊急停止スイッチ	
頭部板屈折角度(手動)	上がり60°	下がり90°
脚板屈折角度(手動)	上がり30°	下がり90°
脚板展開角度(手動)	左右90°	
取り外し	頭部板/脚板(左右)/腰板(左右)	
その他の手動機能	非常用ブレーキ解除ハンドル	

標準構成品
牽引手術台 MOS-1302B 1台
(本体 1台、ミズホオリジナルマットレス 1組、
操作ボックス 1個、電源コード 1本)

外寸図

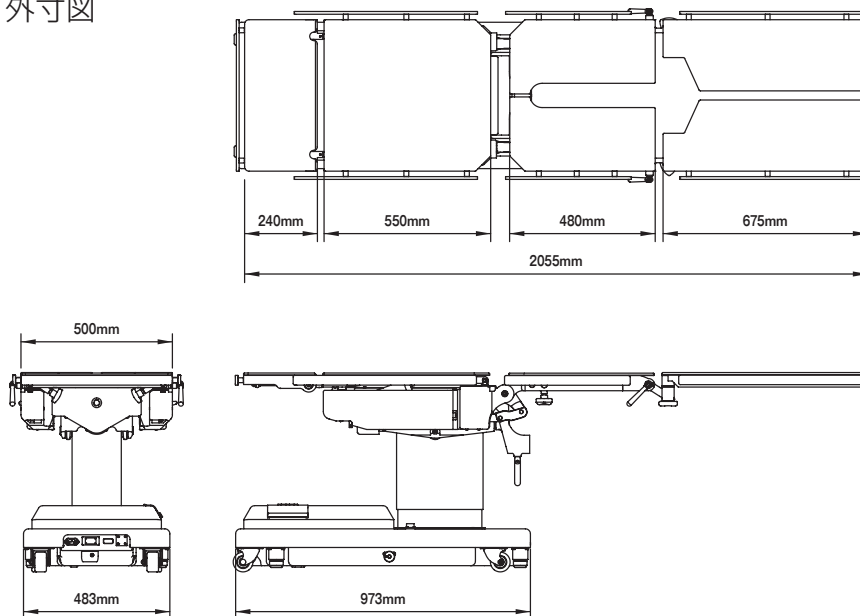

手術台の保守・点検サービス「Mizuho Care」のご案内

ミズホではお客様の手術台をより良い状態でご使用いただくために、保守点検サービス「Mizuho Care」をご提供しております。詳しくは弊社営業所または購入代理店までお問い合わせください。

ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよく読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

