

Yコネクタホルダーボード

Y-Connector Holder Board



ディスプレイザブル

特許取得済み

開発指導：りんくう総合医療センター 脳神経外科 出原 誠 先生 / 放射線科 行 正剛 技師

脳血管内治療に使用するYコネクタを固定するボードで、術者の操作をサポート。
φ5.0～φ8.0の範囲でYコネクタを把持することが可能です。

Before

従来では術者がコイルの挿入、助手がマイクロカテーテルの操作を行う方法をとることがあり、2人がタイミングを合わせるのが難しい場合がありました。

また、術者1名での操作の場合は右手でYコネクタを握りながらワイヤーの操作を行うため繊細な操作をするには高い熟練度を必要とし、どちらの方法も難易度が高いという課題がありました。

2名による操作



1名による操作




After

YコネクタホルダーボードでYコネクタを固定することにより、術者の右手のみで安定した繊細なワイヤー操作ができ、それによって左手はマイクロカテーテルの操作に集中することができます。術者一人で、マイクロカテーテルとワイヤーの操作を同時に容易に行うことができるようになりました。






使用例

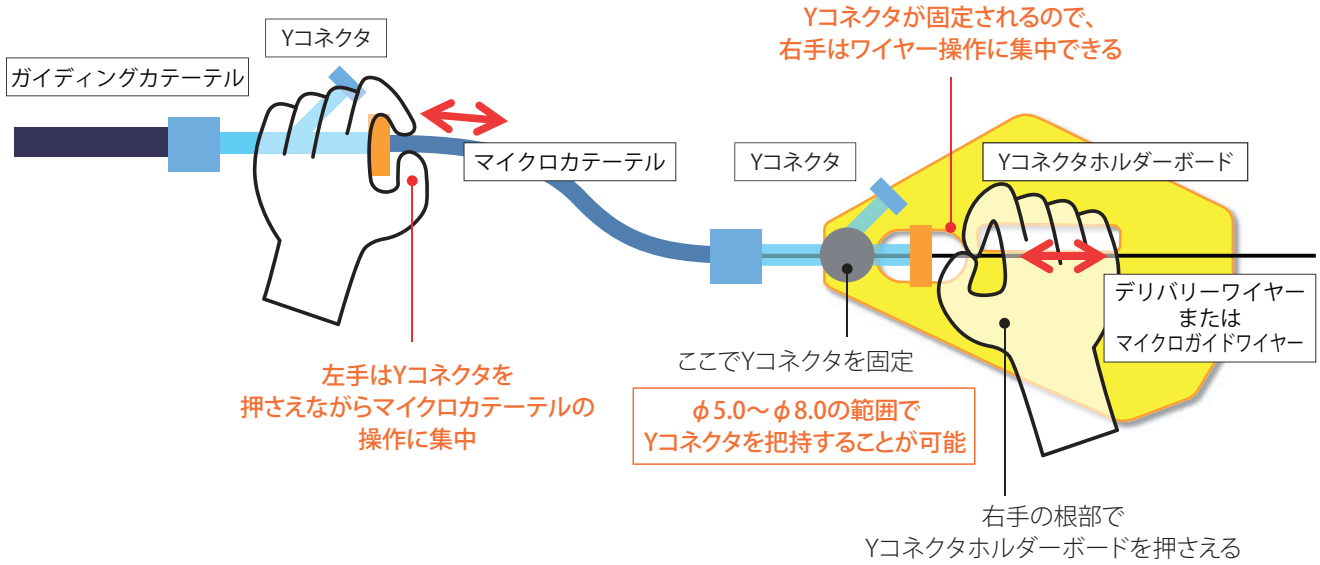

商品コード	JANコード	商品名	仕様
07-991-01	4946329310382	Yコネクタホルダーボード	ディスプレイ 滅菌済

外寸図

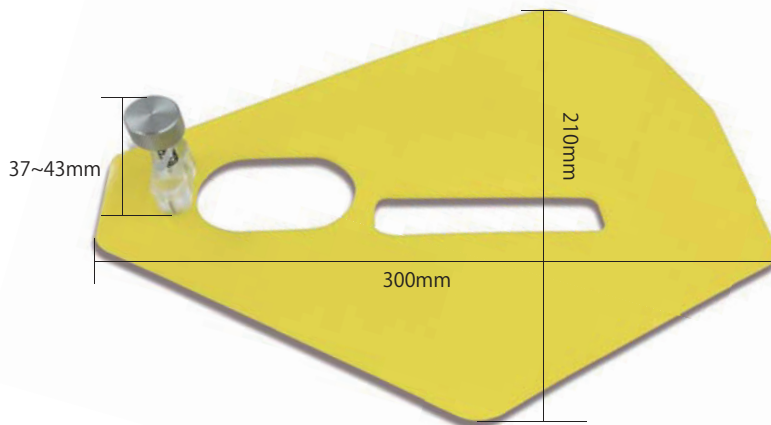

ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



2501-PDF-MIZUHO-001-2501